



Welch Allyn

Digitaalinen ProBP™ 2000 -verenpainemittari




Automaattisen verenpainemittarin lukemat helposti, nopeasti ja tarkasti



WelchAllyn®

Welch Allyn ProBP 2000 on IHANTEELLINEN VERENPAINEN MITTAUSRATKAISU hoitoympäristösi

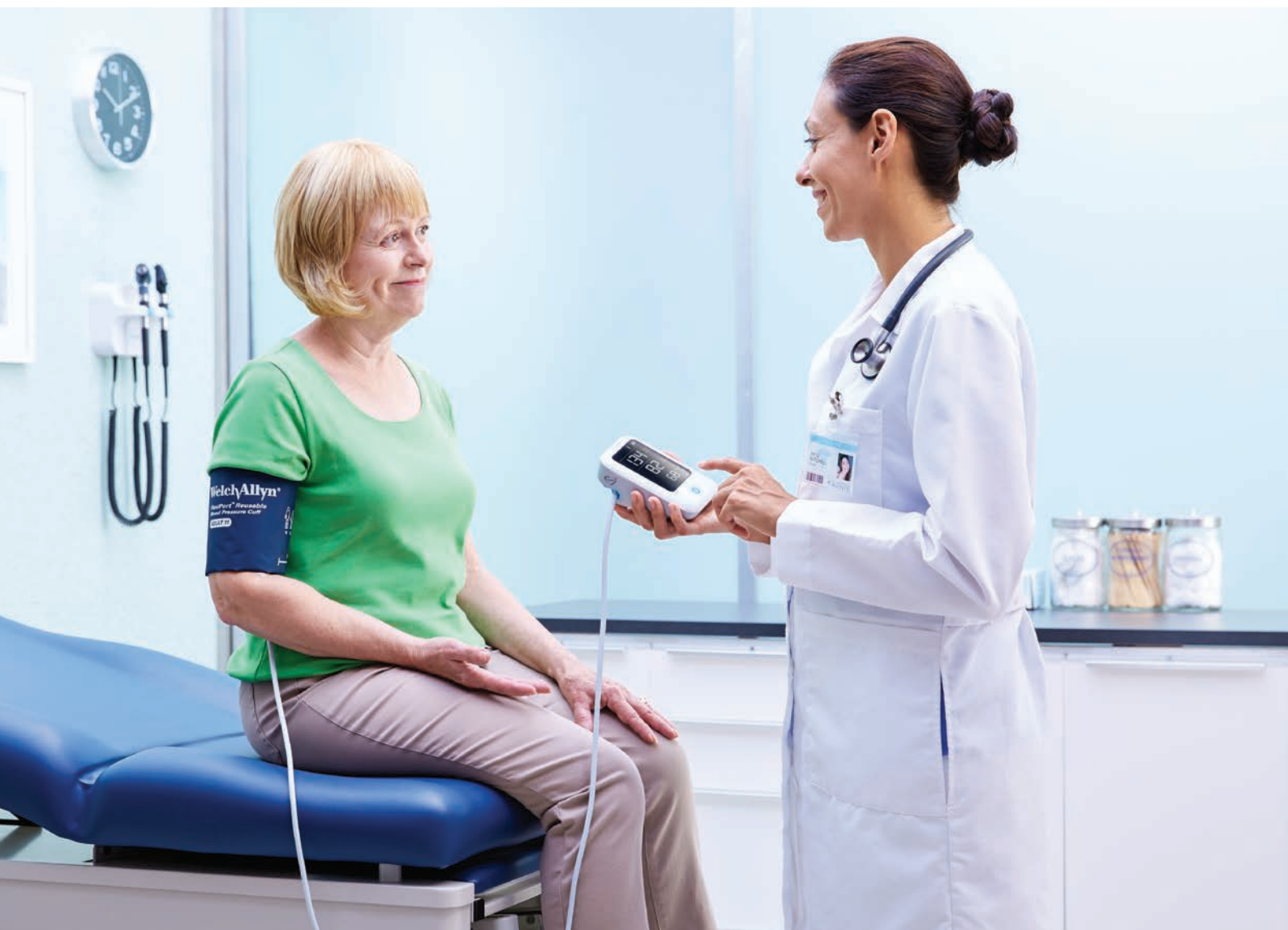

TARKKUUS



LUOTETTAVUUS



NOPEUS

Kun etsit kliinistä digitaalista verenpainemittaria, **tarkkuus** ja **luotettavuus** ovat todennäköisesti suurimmat huolenaiheesi. Welch Allynin uuden digitaalisen ProBP 2000 -verenpainemittarin tekniset ominaisuudet takaavat, että voit luottaa sen antamiin tuloksiin.

Olemme yhdistäneet kaksi innovatiivista tekniikkaa, jotka parantavat tutkimuksia sekä käyttäjän että potilaan kannalta.

Welch Allyn SureBP® -tekniikka

Täyttöperusteista SureBP-algoritmia käytetään kaikissa Welch Allynin elintoimintojen monitorointilaitteissa. Sen avulla hoitohenkilöstö pystyy tallentamaan verenpainelukemat automaattisesti, nopeasti ja tarkasti kaikissa hoitotilanteissa.

- Verenpainelukemat tallennetaan täyttömenetelmällä noin 20 sekunnissa, ja käyttömukavuus on entistä parempi.
- Laite täyttää AAMI-standardin verenpainelukemien tarkkuutta koskevat vaatimukset.
- Laite alkaa mitata mansetin täyttöä yhden painikkeen painalluksella.
- Valmistumisaste on 97 %, jos potilas liikkuu.¹



“Uusi SureBP-tekniikka on todella nopea, parantaa potilaan mukavuutta ja on entistä luotettavampi.”

Bruce S. Alpert | Tennesseen yliopisto,
AAMI:n verenpainemittareista vastaavan
komitean puheenjohtaja

Welch Allyn FlexiPort® -verenpainemansettien tekniikka

Oikean kokoisen mansetin käyttäminen on tärkeää tarkkojen tulosten saavuttamiseksi. Welch Allyn FlexiPort -mansetteja on saatavilla useita eri kokoja, joten ne sopivat laajalle potilasryhmälle ja voit valita kullekin potilaalle sopivan kokoisen mansetin. Samalla myös mittaustarkkuus paranee.

- Ainutlaatuinen paikalleen napsahdava yhden kohdan liitäntä auttaa välttämään perinteisten mansettiletkujen ja -liittimien aiheuttaman sekasotkun ja helpottaa näin työskentelyä kiireen keskellä.
- ProBP 2000 on yhteensopiva kestäkäyttöisten FlexiPort-mansettien kanssa, joita on saatavilla potilaille lapsista isokokoiisiin aikuisiin ja reidestä tehtäviin mittauksiin (15–55 cm).
- SureBP-tekniikan ansiosta täyttölukemat saadaan tallennettua noin 20 sekunnissa.¹



KESTOKÄYTTÖISET

WELCH ALLYN FLEXIPORT®

-VERENPAINEMANSETIT



Digitaalinen ProBP 2000 -verenpainemittari - tuotetiedot

Ulkomitat	Leveys: 94 mm (3,70 tuumaa) Pituus: 142 mm (5,59 tuumaa) Korkeus: 66 mm (2,59 tuumaa)
Paino	283 g (0,62 lbs) ilman paristoja
Näyttö	Digitaalinen nestekidenäyttö VA 68 x 90 mm, paineen ja sykkeen näyttö
Mahdolliset virtälähteet	4 AA-alkaliparistoa, 6 VDC (sisältyvät toimitukseen) verkkovirtalähde (107041) Syöttö: 100-240 V ~ 50-60 Hz, 400 mA Lähtö: 6 V, 1
Menetelmä	Oskillometrinen
Mittausalue	Ilmoitettu mansettipaine: 0-299 mmHg (0-40 kPa) Mittauspaine: Systolinen: 50-260 mmHg Diastolinen: 25-220 mmHg Syke: 40-199 lyöntiä minuutissa
Tarkkuus	Paine: +/-0,4 kPa (3 mmHg) Pulssin tiheys: +/-4 %

Varaosat ja lisävarusteet*

KOKOONPANOT

- 2000** Digitaalinen ProBP 2000 -verenpainemittari, koon 11 kestäkäyttöinen FlexiPort-mansetti aikuisille, 4 AA-paristoa
2000-P Digitaalinen ProBP 2000 -verenpainemittari, koon 11 kestäkäyttöinen FlexiPort-mansetti aikuisille, 4 AA-paristoa ja verkkovirtalähde

LISÄVARUSTE

- 107041** Virtalähde
(sisältää US-, EU-, UK- ja AU-muuntajat)

FLEXI-PORT-VERENPAINEMANSETIT

- REUSE-09** Lapsi (15-21 cm)
REUSE-10 Pieni aikuinen (20-26 cm)
REUSE-11 Aikuinen (25-34 cm)
REUSE-11L Pitkä aikuinen (25-34 cm)

- REUSE-12** Isokokoinen aikuinen (32-43 cm)
REUSE-12L Isokokoinen pitkä aikuinen (32-43 cm)
REUSE-13 Reisi (40-55 cm)

*Pyydä paikalliselta Welch Allyn -edustajalta täydellinen luettelo alueellasi saatavilla olevista kokoonpanoista ja lisävarusteista.

Lisätietoja saat osoitteesta www.welchallyn.fi tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Welch Allyn -myyntiedustajaan.

¹ Welch Allyn Motion Tolerance Clinical Study, elokuu 2016

² Alpert, Bruce S., Clinical evaluation of the Welch Allyn SureBP® algorithm for automated blood pressure measurement. Blood Pressure Monitoring, Vol. 12 No. 4, elokuu 2007.



Welch Allyn EMEA Customer Care

Puh. +358 969 379 386

nordicorders@welchallyn.com

WWW.WELCHALLYN.FI

WelchAllyn®

Hill-Rom®

©2018 WELCH ALLYN, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. DOC. NO: SM4185FI REV.A MC14918, TOUKOKUU 2018

Digitaalinen ProBP 2000 -verenpainemittari on tarkoitettu verenpaineen ja sykkeen mittaamiseen lapsi- ja aikuispotilaille. Lääkinnällinen laite (93/42/ETY): Luokka IIa. Ilmoitettu laitos: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (CE0197) Valmistaja: Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd. No. 105 Dongli Road, Torch Development District, Zhongshan, 528437, Guangdong, Kiina. Edustaja EY-alueella: MDSS-Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Saksa. Tämä lääkinällinen laite on säädösten alainen terveydenhoitotuote, jolla on kyseisten säädösten mukaisesti CE-merkintä. Welch Allyn kehottaa käyttäjää lukemaan huolellisesti lääkinällisten laitteiden mukana toimitetut ohjeet, joissa on neuvottu turvallinen ja asianmukainen käyttö. Terveydenhuollotilosten henkilöstö on vastuussa näiden lääkinällisten laitteiden asianmukaisesta käytöstä ja ylläpidosta. Welch Allyn pitääää oikeuden muotoilla, teknisiä tietoja ja malleja koskeviin muutoksiin. Welch Allynin antama nimenomainen kirjallinen takuu koskee ainoastaan yhtiön tuotteiden myyntiä.